


AquaJet®

keimfrei – sauber

Bedienungsanleitung Tisch-Spender für Handdesinfektion Touchless

Instructions d'utilisation
Distributeur de table pour la désinfection
des mains sans contact

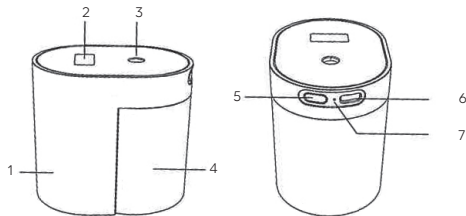

- 1 Gehäuse
- 2 Sensor-/Anzeigefenster
- 3 Sprühdüse
- 4 Flüssigkeitsbehälter
- 5 Ein/Aus-Taste
- 6 USB/C-Stecker
- 7 Lade-Kontrollleuchte

- 1 Logement
- 2 Fenêtre de détection/affichage
- 3 Buse de pulvérisation
- 4 Récipient à liquide
- 5 bouton On/Off
- 6 Connecteur USB/C
- 7 Témoin lumineux de charge

Bedienungsanleitung

- Entfernen Sie den Flüssigkeitsbehälter, fügen Sie AquaJet® Anolyte in einer Menge von maximal 4/5 des Volumens hinzu und setzen Sie den Flüssigkeitsbehälter wieder ein.
- Drücken Sie die Ein/Aus-Taste kurz, um das Gerät zu starten (die blaue Kontrollleuchte des Anzeigefensters leuchtet drei Sekunden lang). Das Gerät ist nun bereit. Wenn Sie das Gerät abschalten möchten, drücken Sie die Ein/Aus-Taste erneut.
- Halten Sie Ihre Hand oder einen Gegenstand 0 bis 12 cm über das Sensorfenster und schalten Sie so das Sprühen ein. Wenn Sie das Sprühen nochmals einschalten möchten, können Sie dies erneut tun.
- Wenn das Gerät mehr als 24 Stunden lang nicht verwendet wird, wird das Gerät automatisch abgeschaltet.
- Das Gerät hat eine eingebaute Batterie. Bitte verwenden Sie den DC5V1A-Adapter zum Laden. Beim Laden leuchtet die Lade-Kontrollleuchte rot, bei voller Ladung grün.